

Adesivo smalto dentinale automordenzante per restauri in composito e protezione de la dentina.

# Hybrid Bond

**35 secondi soltanto !!**

- Senza mordenzatura iniziale... un solo strato !!
- Senza miscelazione grazie ai Microbrushes® chimicamente attivi !!
- Compatible con tutti i tipi di lampada !!
- Punto di giuntura molto fine ed estremamente resistente !!



 **SUN MEDICAL**

# Hybrid Bond

## Ricostruzioni dirette in composito



Applicare



Fotopolimerizzare



Lucidare



Caso terminato

## Ricostruzioni indirette



Dente preparato



Applicazione



Pronto per l'impronta

## UN'ADESIONE FACILISSIMA IN 35 SECONDI


Nessuna mordenzatura iniziale, solo uno strato !

La procedura di lavoro impegna solo 35 secondi !!

SOLAMENTE **35** SECONDI !



Applicare  
20 sec

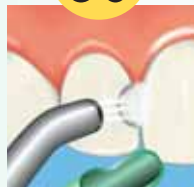

Asciugare  
10 sec



Fotopolimerizzare  
5 sec  
Con lampada alogena

## UN PUNTO DI GIUNTURA MOLTO FINE ED ESTREMAMENTE RESISTENTE

Solamente 9 micro ed assenza di sensibilità post-operatoria !

Un solo strato è sufficiente per bloccare qualsiasi stimolo meccanico o chimico che possa agire sul sistema pulpo-dentinale.



Hybrid Bond

Autre

Un'estetica perfetta in concomitanza dei bordi del restauro

## COMPATIBILE CON TUTTI I COMPOSITI E TUTTE LE LAMPADA POLIMERIZZATRICI


Alogene, Xenon (arc al plasma), Led (diodi).

Hybrid Bond aderisce a tutti i tipi di compositi (auto, foto, dual) e polimerizza con tutte le lampade.

## ADESIONE ELEVATISSIMA

Un'adesione molto forte allo smalto, alla dentina ed al composito Grazie al monomero 4-META !

Hybrid Bond penetra nel dente formando uno strato ibrido di 4-META che costituisce un fondo di protezione estremamente resistente.

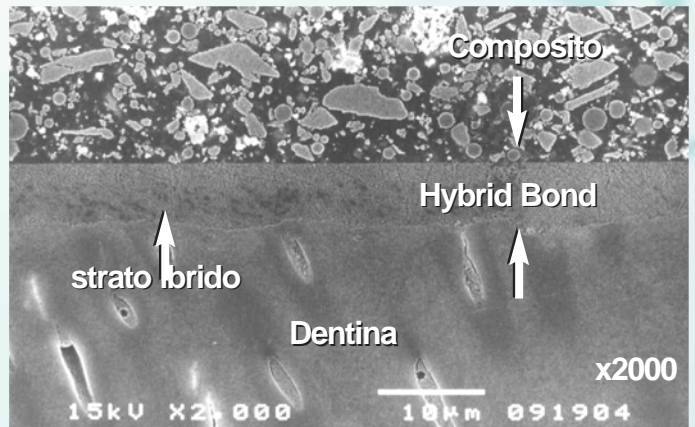

Source : Dr Nikaido, Tokyo Medical and Dental University

**SUN MEDICAL**

Un prodotto SUN MEDICAL distribuito da  
GENERIQUE INTERNATIONAL

**Mc3 - Communication**

Mc3.Communication - via Don Minzoni, 38  
20091 Bresso (MI)  
Tel. 02.6143013 - mc3com@hotmail.it

**GÉNÉRIQUE**  
INTERNATIONAL

CE  
0123