

au 4 META*

Hybrid Bond ONE

Adhésif dentaire amélo dentinaire
de type SAM 1

1 seul flacon

1 seule application



APPLICATION




Appliquer 20 sec

Maintenir la surface humide
pour une meilleure adhésion



Séchage à l'air 5-10 sec

Sécher à l'air avec l'aspiration
pour éviter une dispersion du
Hybrid Bond One

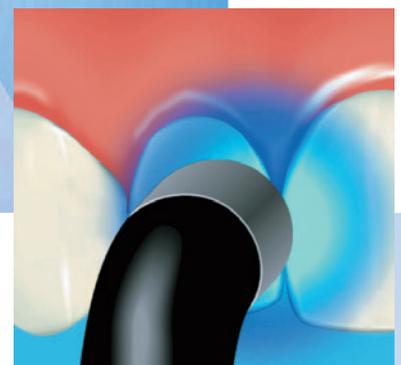

Photopolymériser 5 sec

*le monomère 4 META est un composant du Superbond C&B


Supprimer l'eau efficacement

L'eau est efficacement transportée par l'évaporation de l'acétone

Mécanisme du retrait de l'eau

【 Juste après l'application 】

● Monomère ● Acétone ● Eau

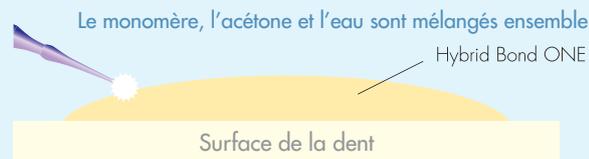

【 Après 30 sec 】



【 Le nouveau monomère permet une séparation facile de l'eau, de l'acétone et du monomère 】

L'eau peut être alors soufflée efficacement



L'eau est éliminée par le séchage à l'air laissant une surface collée homogène

Séparation lors de l'évaporation de l'acétone




a: Hybride Bond ONE est composé de monomère de résine et des solvants eau et acétone. Tous les composants sont parfaitement mélangés pour former un liquide jaune transparent.

b: L'acétone s'évapore, l'eau et le monomère de résine hydrophobique se séparent en 2 couches distinctes


Une adhésion durable

Hybrid Bond ONE a les mêmes performances de collage sur l'émail et sur la dentine

【 Cisaillement sur émail bovin 】

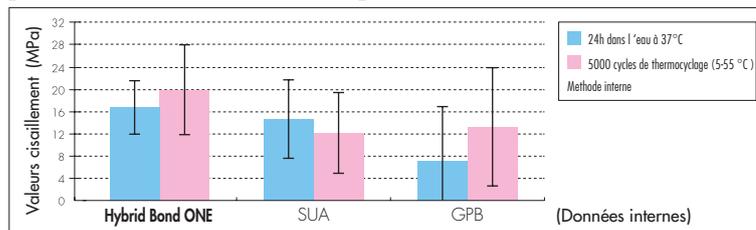

【 Cisaillement sur dentine bovine 】

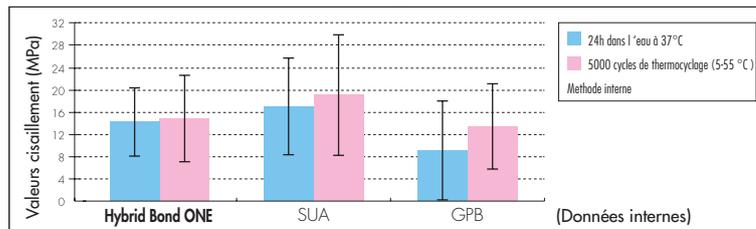

Fabriqué au Japon par

SUN MEDICAL CO.,LTD.

571-2 Furutaka-cho, Moriyama, Shiga, 524-0044, Japan Phone:81-77-582-9981 Fax:81-77-582-9984 <http://www.sunmedical.co.jp>

Dispositif médical (DM) de Classe IIa, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale.

Lire attentivement avant l'utilisation le mode d'emploi et l'étiquetage - Organisme certificateur : TÜV SÜD Product Service GmbH - version Septembre 2019

GÉNÉRIQUE
INTERNATIONAL

GENÉRIQUE INTERNATIONAL


77/79 rue Pierre Brossolette • 93160 NOISY LE GRAND • Tel. 01 43 03 06 84

E-mail : generinter@aol.com - Web : www.generiqueinternational.com



Une couche adhésive de seulement 5 microns d'épaisseur

Idéal pour les cas les plus esthétiques

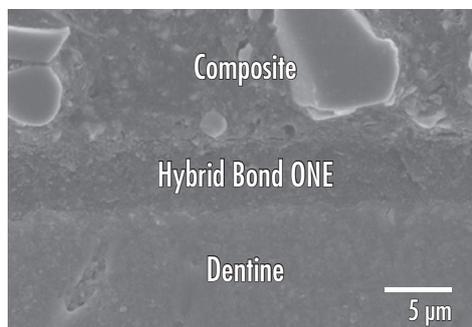

Le coffret Hybrid Bond ONE contient :

- 1 flacon de 5 ml
- 1 mode d'emploi

CE
0123